

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

レーズ用ブラシ

【形状・構造及び原理等】**

【形状・寸法】

本品には、大きさや形状の違いにより以下の形態がある。
(単位: mm)

種類名	ブラシ外径	形状
1 列プラスチック柄	50	
2 列プラスチック柄	55	
3 列プラスチック柄	78	
4 列プラスチック柄	78	
3 列軟毛プラスチック柄	70	
1 列メタルセンター柄	48	

【原理】

豚毛製または山羊毛製の作業部により研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 歯科技工用電気レーズに装着する。
- (2) 本品を回転させ、被研磨物に作業部をあて、研磨材を用いて研磨する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 歯科技工用電気レーズメーカーの指定に従ってコア部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定(製品の被包に記載)の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。[呼吸による粉塵の吸入を防ぐ]
- (2) 保護めがね等を使用すること。[目の損傷を防ぐ]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者: 株式会社モリタ

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: オズボーン Osborn GmbH

国名: ドイツ

【お問い合わせ先】

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号: 0800-222-6480 (無料)

E-mail: e-customer@morita.com