

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

LUNOS プロフィーペースト

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- リモンネンに対してアレルギー反応を起こしやすい患者には、オレンジを使用しないこと[アレルギー反応を起こす恐れがある]
- ペパーミントオイルに対してアレルギー反応を起こしやすい患者には、ミントを使用しないこと[アレルギー反応を起こす恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

【形状】

本品はペースト状である。

【種類・体に接触する部分の主な組成】

(1) LUNOS プロフィーペースト 2 in 1

種類	色調	成分
ニュートラル	白	長石、グリセリン、珪灰石、リン酸三カルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、その他
オレンジ	黄	オレンジ香料、長石、グリセリン、珪灰石、リン酸三カルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、その他
ミント	青	フッ化ナトリウム、ペパーミントオイル、長石、グリセリン、珪灰石、リン酸三カルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、その他

(2) LUNOS プロフィーペースト スーパーソフト

種類	色調	成分
ニュートラル	白	リン酸三カルシウム、グリセリン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、その他
オレンジ	オレンジ	オレンジ香料、リン酸三カルシウム、グリセリン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、その他

【原理】

本品に含まれる界面活性剤が着色等の汚れを除去し、研磨成分が歯、義歯、人工歯冠等の表面を滑らかにする。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

予防治療ブラシまたは歯磨カップに本品を適量取り、歯、義歯、人工歯冠等の清掃、研磨を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 使用する予防治療ブラシ・歯磨カップは、指定の回転数を超過して使用しないこと。[歯面での発熱やペーストの飛散を防ぐ]

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 術者及び患者は、保護メガネを着用すること。[使用中のペーストの飛散により眼球損傷の恐れがある]
- 万一、本品が目に入った場合は、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

- チューブの蓋をしっかりと閉めて保管すること。
- 直射日光の当たらない場所で保管すること。
- 25℃以下の場所で保管すること。

【有効期間】

製造日より 30 ヶ月[自己認証(外国製造業者データ)による。]
容器及び表示ラベルに記載の※使用期限までに使用すること。
※砂時計マーク○○○○ー△△は、使用期限○○○○年△△月を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：オロケミ GmbH
Orochemie GmbH+Co. KG

国名：ドイツ

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com