

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

滅菌アルファコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止
体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿
本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法
本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。
2. 使用後
血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。
3. 残品
滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）
使用期限はラベルに記載。

【包装】

パッケージに内容物の入数を記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元
大衛株式会社
大阪府大阪市都島区都島本通2-3-3
TEL. 06-6921-7373