



* C P 0 5 0 4 0 2 *

【CP-05】

** 2016 年 8 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

* 2012 年 11 月（第 2 版）

医療機器届出番号：27B1X00116000186

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（JMDN コード：16779000）

ディスプレイザブル コネクティングチューブ（ショートタイプ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 再使用禁止。

** 2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

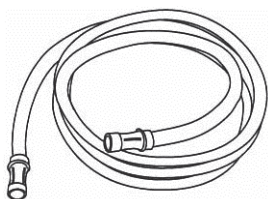

型番	全長 (m)	内径 (mm)	コネクタ
3648	1.8	4.8	メス・メス
3628	1.8	6.4	メス・メス
3786	1.8	6.4	オス・メス
3704	1.8	7.1	メス・メス
3705	2.7	7.1	メス・メス
3677	3.0	4.8	メス・メス
3629	3.0	6.4	メス・メス
3656	3.7	4.8	メス・メス
3655	3.7	6.4	メス・メス

コネクタのオス・メスタイプはチューブ延長用である。

＜組成＞

ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含む）

** ＜原理＞

吸引器より吸引された血液、体液、分泌液、骨片などが本品を介して回収容器に送られる。

【使用目的又は効果】

本品は、吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のある滅菌済のプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 接続する各種の機器類やチューブ類の径及び、必要な距離を確認し、対応したコネクティングチューブを選択する。

** 2. 本品を無菌的に取り出して接続する機器の径を合わせて緩まないように接続する。

3. 同じタイプのコネクティングチューブを追加接続し、延長する場合には、オス・メスコネクタのついたタイプを選択し、コネクタを利用して連結する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. コネクティングチューブが閉塞しないように、過度に折り曲げたり踏みつけたりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

** 1. 保管上の注意

(1) 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

(2) 保管環境

温度 10～32℃

＜有効期間＞

** 5 年間[自己認証（当社データ）による]

使用期限は、直接の包装および外箱に表示している。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

** 電話番号：06-6222-6606

製造元

コンメド社（アメリカ合衆国）

CONMED Corporation