

器25 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 31776000

コントラスター


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

● アンテリアタイプ



● オクルーザルタイプ

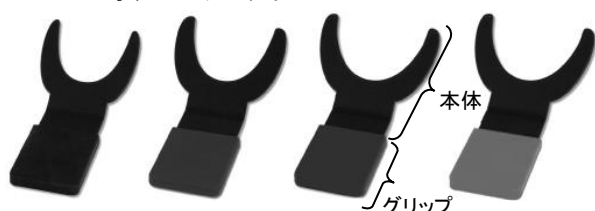

2. 原材料

本体	: アルミニウム
グリップ	: シリコンラバー

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具。

【使用方法等】

- 患者ごとに洗浄、殺菌を行います。
- 被写体の不要な部分を覆い隠し、口腔内を撮影します。
 - アンテリアタイプ: 前歯背面に本品を挿入し、背景を黒くして前歯を撮影します。
 - オクルーザルタイプ: 口唇を覆い隠し、背景を黒くして歯列弓を撮影します。
- 使用後は、流水により唾液などを流し、食器用洗剤で洗浄して下さい。洗浄後、清潔なガーゼなどの柔らかい布で水分を拭き取して下さい。本体の水分拭き取った後は、シリコンカバーを外しグリップ内の水分を拭き取して下さい。

【使用上の注意】

- ・ 本体に強い衝撃を与えないでください。破損したり、傷ついたりするおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温多湿を避け、直射日光のあたらない場所で保管して下さい。
- 保管する前には、必ず十分に乾燥させて下さい。汚れ、水分等の付着はシミの原因となることがあります。
- サビのある器具や化学薬品から離れたところに保管・収納して下さい。サビ・変色の原因となります。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後の点検: 使用前・使用後に、破損・ヒビ・キズ・変色・腐食等の異常がないかを確認してください。
- 上記のことがみられた場合は、使用を中止してください。
- 消毒する際の注意
 - (ア) 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書を参照し、金属腐食を起こすものは避けて下さい。
- 洗浄する際の注意
 - (ア) 塗面を傷めるおそれのある磨き粉、金属ウール、金ブラシ等は使用しないで下さい。
 - (イ) 超音波洗浄器は塗面が剥離する可能性がありますので使用しないで下さい。
 - (ウ) ジェットウォッシャーは使用しないでください。塗面が傷つくおそれがあります。
 - (エ) 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので使用しないで下さい。
- オートクレーブは使用しないでください。塗面が剥離するおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

有限会社デンタルテクニカ

〒567-0046 大阪府茨木市春日 1-1-1

<http://www.dentaltechnica.com>

info@dentaltechnica.com

TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844

外国製造業者

MK-dent GmbH

(国名: ドイツ)