

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

SELT™ 自己採取用スワブ+UTM 輸送用培地

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品は、プラスチック製の軸の先端部にポリアミド製の繊維を取り付けた綿棒です。検体採取後に軸を折り切るための破損箇所が設けられています。

本品を使用して採取したサンプルは、輸送用培地に保存するため、外部に漏れることはありません。

*製品コード・ 商品番号	規格 50セット入り
STS2・ T5021	自己採取用鼻腔スワブ+口腔スワブ+UTM輸送 培地 2ml (5ml /12mm Φ チューブ)
* T5205	GTS2口腔用 バラ 3600本
** PN002	口腔用スワブ 50本

2. 材質・組成

スワブ

頭(底)部分

ハンドル部分

head (bottom) part

handle part



【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取する器具です。医療従事者や一人によって採取する医療用スワブであり、鼻腔または口腔からサンプルを採取し、輸送・保存することを目的とします。

【使用方法等】

1. 使用方法


- 1) 石鹸で20-30秒間、手を洗います。
- 2) マスクを着用し、息を深く吸って3-5回、咳をします。
- 3) パッケージを開封しハンドル部分を持ちながらスワブを取り出します。ハンドル部分以外は持たないでください。



- 4) スワブの頭の部分を口腔に挿入して、5回こすり、唾液を染み込ませます。



- 5) 輸送容器にスワブの頭の部分を入れます。破損箇所ですワブを折ります。キャップを閉め、サンプルが均一になるように軽く振ります。

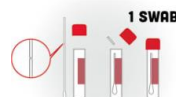

- 6) ハンドル部分を持ちながら、二本目のスワブを取り出します。ハンドル部分以外は持たないでください。




- 7) 鼻腔にスワブの頭の部分を挿入し、10回こすりします。



取扱説明書を必ずご参照ください。

- 8) アルコールで容器の表面を拭きます。ラベルにサンプル情報を記載します。輸送用のプラスチックバッグで容器を密封します。

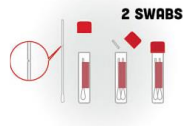

- 9) 輸送容器にスワブの頭の部分を入れます。破損箇所ですワブを折ります。キャップを閉め、サンプルが均一になるように軽く振ります。



※検査室や研究所まで出来るだけ早く搬送してください。

【使用上の注意】

〈 重要な基本的注意 〉

1. 体外診断用のみ使用されます。
2. 検体者は医療従事者の監視のもとスワブ検査が出来ます。
3. 使用方法について指導を受けた人が使用すること。
使用目的以外の用途には適していません。
4. 使用方法には必ず従ってください。
5. 本品は使い捨てです。1度使用した後は捨ててください。
再利用しないで下さい。
6. 万が一、本品の袋やチューブが破損している場合やキャップが開いている場合は、本品は使用する事が出来ません。
7. 使い捨ての医療製品になりますので、再利用されると、感染症を引き起こしたり、良くない結果に繋がりがかねません。
8. 有効期限が切れた後は使用しないでください。
9. サンプルを収集する時お過度の圧力でスティックを壊してしまう恐れがあります。適切な圧力をかけるようにして下さい。
10. 一時的な時間でサンプルを採取するのに十分な強度しかないため、サンプリングに時間がかかると、内容物がスワブから落ちる恐れがあります。
11. スワブの頭の部分に触れないで下さい。
12. 採取済みのスワブは、輸送用培地のキャップと手で壊す必要があります。
13. サンプルを取り扱う際は、防護手袋やその他、保護出来るツールを使って慎重に取り扱って下さい。
14. 他の細菌による感染や検体を運ぶ際の培地の漏れを防ぐ為に、キャップをしっかりと閉めて下さい。
15. 変色した媒体は使用しないで下さい。感染している恐れがあります。
16. 皮膚や粘膜に触れないようにご注意ください。
17. 2人以上の検体者のサンプルを1つの輸送用培地に入れないでください。
18. 感染性物質が含まれている恐れがあるため、サンプルの取り扱いには注意してください。施設の廃棄物規制に従ってサンプルを処分してください。
19. すべてのテストは、汚染のない場所で実施する必要があります。
20. サンプルの採取は、使用方法に従い医療従事者もしくは検体者によって行います。診断テストは医療専門家によって病棟で行われます。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法・有効期間

本品は、未開封であり、製造日から12カ月間は、2～30℃で保存出来ます。2～30℃を超えないようにし、使用する前に培養したり、凍結させないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エクセル・クリエイツ
住 所：〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1-16-13
堺筋ベストビル
電 話 番 号：06-6121-2130

外国製造業者：SG Medical, Inc.
国 名：韓国