

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ボナエレクトロリット

【形状・構造及び原理等】

〔構造及び成分〕

構造：無色透明の液体

成分：希硫酸

〔原理〕

電解研磨器の浴槽に本電解液を入れて、電解研磨をする。

【使用目的又は効果】

本品の液に、プラス電極に固定したコバルト・クロム合金の補綴物を入れ、適切な直流電流を流して電解研磨をする。

【使用方法等】

1. 鑄造後の補綴物をブラスト処理、カーバイドバー等で酸化膜と埋没材を除去する。
2. 本品を満たした容器に、電解研磨器のプラス電極に固定した補綴物を入れ適切な電流を流し電解研磨をする。

【使用上の注意】

1. 電流の調整は適切に行うこと。
2. 電流を流す時間は適切にすること。
3. 陰極と補綴物が接触しないようにすること。
4. 液は空気中の水分を吸収するので、電解研磨が終了したら液を専用ボトルに入れ、蓋をきちっと閉める。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分を避けて、外圧(物理的負荷)を受けないように保管すること。
 - ・換気の良い場所に置くこと。
- * 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【取扱い上の注意】

1. 本品を使用するときはゴム手袋を使用すること。
2. 保護メガネをし、目に入らないようにすること。
3. 目に入ったときは、大量の流水で目を洗い、直ちに医師の手当てを受けること。
4. 廃液処理は専門の業者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エービーエス株式会社
製造業者 Interdent d.o.o.
国名 スロベニア