

# 添付文書

2024年7月4日（第1版）

製造販売届出番号：27B2X00043000006

類別：機械器具 12 理学診療用器具

一般医療機器 一般名称：弾性ストッキング（JMDMコード 31724000）

販売名：一般医療機器消臭着圧ハイソックス

## 【警告】

### 1. 適用対象

- 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者。  
（圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。）
- 装着部位に神経障害のある患者。  
（血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。）
- 糖尿病患者。  
（無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。）
- 繊維に対して過敏症のある患者。  
（非接触皮膚炎症を起こすおそれがあるため）

### 2. 使用方法

医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。  
（臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。）

## 【禁忌・禁止】

- 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者  
（圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。）
- 感染性静脈炎の患者  
（菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。）
- 装着部位に極度の変形を有する患者。  
（適切な圧迫圧が得られないため。）

## 【形状・構造及び原理】

本品は、糸が筒状に形成された形状を持つ弾性ストッキングである。編み上げた糸の弾力と構造により末梢から中枢に向かう各部位で漸次的な圧迫を加える構造である。

## 【原材料】

ナイロン、ポリウレタン

## 【性能及び安全性に関する規格】

着圧値

足首部：34hpa±15%、ふくらはぎ部：22hpa±15%

## 【使用目的、又は効果】

装着部位の血行促進、脚のムクミの軽減

「末梢から中枢に向かい漸次的に圧迫を加えることにより、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進する。」

## 【包装】

1足入り

## 【使用方法】

- たぐりよせて、つま先を先端まで入れる。
- 足首まで引き上げ、かかとの位置を正確に合わせる。
- 両手の親指を内側に入れて、すこしずつ均等に引き上げる。  
※サポート力が強いいため、注意しながらゆっくり引き上げてください。
- しわができないように、少しずつ均等にひざ下まで引き上げる。

## 【取扱上の注意】

- 次の方は、ご使用前に医師に相談すること。  
(1) 現在、病气やけがなどによる脚のむくみやだるさを感じる方  
(2) 血圧の高い方、心臓・腎臓などに障害のある方  
(3) 現在、かゆみや発疹をおこしている方  
(4) 血行障害をおこしたことのある方
- サイズの合わないものを使用しない。（血行がわるくなるおそれがあります。）
- 2枚重ねて使用しない。（血行が悪くなるおそれがあります。）
- ソックスをひざ裏にかかるまで引き上げない。（ひざ裏の血行が悪くなるおそれがあります。）
- 使用中、使用後に気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの以上を感じた場合は、すぐに使用を中止する。
- 就寝中に使用しない。

## 【お手入れ方法】



他の衣類とは分類し、洗濯マークの指示に従って手洗いです。

- 色の異なるものといっしょに長時間、洗液につけないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 乾燥機、アイロンなどの強制乾燥はしないでください。（伸縮性がなくなる原因になります。）

## 【保管方法及び有効期限】

本品は、高温、多湿や直射日光を避け、水濡れに注意して保管してください。

## 【保守・点検に係る事項】

繰り返し使用する場合、傷やほつれ、繊維の劣化等がないことを確認してから使用してください。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：サンエス工業株式会社

大阪府吹田市南吹田3丁目1-25

<※裏面もご確認ください>