

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

ハクゾウ滅菌ブライガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1. 再使用禁止
- 2. 体内に留置しないこと。
- * 3. 電気メス等を近づけないこと。【引火する恐れがある】

【形状、構造及び原理等】

- * 綿 100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品を酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- * 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
 - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
- * 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- * 2. 使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社
* 住 所 : 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社