

## ハクゾウクォーターガーゼNEO

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。
- \* 3. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。[切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある]
- \* 4. 電気メス等を近付けないこと。[引火するおそれがある]

#### 【形状、構造及び原理等】

- \* 綿 100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線を検知できる糸を織り込んだものである。

#### 〔X線造影材〕

| 名 称   | 成 分                                            |
|-------|------------------------------------------------|
| X線造影糸 | ・硫酸バリウム（造影剤）<br>・ポリプロピレン（固定材）<br>・ウルトラマリン（着色剤） |

#### 【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線を検知できる成分を用いている。

#### 【操作方法又は使用方法等】

- \* 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌には高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
  - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- \* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- \* 2. 使用期限  
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

#### 【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社  
\* 住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
電 話：06-6942-0451(代)

製 造 業 者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社