

## ハクゾウ滅菌オペガーゼG

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。
- \* 3. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。【切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある】
- \* 4. 電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある】

#### 【形状、構造及び原理等】

- \* 綿 100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線を検知できる糸を織り込んだものである。  
本品は酸化エチレンガスによる滅菌を行っている。

#### 【X線造影材】

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

#### 【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線を検知できる成分を用いている。

#### 【操作方法又は使用方法等】

- \* 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
  - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
- \* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- \* 2. 使用期限  
容器若しくは被包に記載【自己認証による】

#### 【包装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社  
\* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社