

ハクゾウオペガーゼNEO(ヒモ付)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。
- * 3. 線造影系部分を直接挟んで使用しないこと。[切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある]
- * 4. 電気メス等を近づけないこと。[引火するおそれがある]

【形状、構造及び原理等】

- * 綿 100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線を検知できる糸を織り込み、柄を取り付けている。

【X線造影材】

名 称	成 分
X線造影系	・硫酸バリウム(造影剤) ・ポリプロピレン(固定材) ・ウルトラマリン(着色剤)

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線を検知できる成分を用いている。

【操作方法又は使用方法等】

- * 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
 - * 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。
 - * 4) 取り付けられている柄は、身体内部から出して使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- * 2. 使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社
- * 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話 : 06-6942-0451(代)
- 製 造 業 者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社