

ハクゾウオペガーゼ G（ヒモ付）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。
- ＊ 3. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。[切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある]
- ＊ 4. 電気メス等を近付けないこと。[引火するおそれがある]

【形状、構造及び原理等】

- ＊ 綿 100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線を検知できる糸を織り込み、柄を取り付けている。

【X線造影材】

名 称	成 分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線を検知できる成分を用いている。

【操作方法又は使用方法等】

- ＊ 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- ＊ 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。
- ＊ 4) 取り付けられている柄は、身体内部から出して使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ＊ 2. 使用期限
- 容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社
- ＊ 住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- 電 話：06-6942-0451(代)
- 製 造 業 者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社