

ハクゾウ滅菌ラパット G（ヒモ付）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。
- * 電気メス等を近付けないこと。[引火するおそれがある]

【形状、構造及び原理等】

綿 100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて縫製したもので、
X線を検知できる糸及び柄を取り付けている。
本品は酸化エチレンガス滅菌を行っている。

〔X線造影材〕

名 称	成 分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護の
ため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを
目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- * 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し適宜使用する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 包装開封後、速やかに使用すること。
- * 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての
使用はしないこと。
- * 4) 取り付けている柄は、身体内部から出して使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に
保管すること。
- * 2. 使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社
* 住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話：06-6942-0451(代)

製 造 業 者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社