

医 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

滅菌ガーゼ巻きコットンG

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には留置しないこと
- 3.X線造影系を直接挟んで使用しないこと。[切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある]
- 4.電気メス等を近付けないこと。[引火するおそれがある]

【形状、構造及び原理等】

脱脂綿をガーゼで包み込み、端を糸で結んだもので、X線で検知可能な成分を含むものである。また、エチレンオキシaidガス滅菌を行ったものである。

[X線造影材]

名 称	成 分
X線造影系	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

本品を無菌的に滅菌包装より取り出し、使用目的に応じて、直ちに適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
 - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
 - 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品として使用しないこと。
 - 4) 糸を強く引っ張らないこと。
 - 5) 製品を分解して使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2.使用期限
本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証(自社データ)による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に内容量又は入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社
住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話：06-6942-0451(代)

製 造 業 者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社