

医 04 整形用品
一般医療機器 止血用押圧器具 70617000

ハクゾウSPコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維で楕円筒状に加工したものである。

【使用目的、効能又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

【操作方法又は使用方法】

使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。止血部分に圧迫止血できる程度におさえて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包装】

本品の容器若しくは被包に内容量又は入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL 06-6942-0451(代)

・製造業者

ハクゾウメディカルテクノス株式会社