

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## メンカク

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%からなる繊維をパッド状にしたものを裁断したものである。

### 【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる材料をいう。

### 【操作方法又は使用方法等】

- \* 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- \* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- \* 2.使用期限  
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

### \*【包装】

容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

種類	包装
4 cm × 4 cm	100 g / 袋
4 cm × 4 cm	500 g / 箱
5 cm × 6 cm	500 g / 箱
8 cm × 8 cm	500 g / 箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社

\* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : 奈良医療品工業株式会社