

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

シルキュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

綿100%からなる繊維をパッド状にしたものを圧縮し、裁断したものである。

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- * 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
 - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- * 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- * 2. 使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

* 【包装】

容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

種類	包装
4 cm×4 cm	700 g /箱
5 cm×6 cm	700 g /箱
8 cm×8 cm	700 g /箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社
* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話 : 06-6942-0451(代)

- ** 製造業者 : 大三株式会社