

ヒモ付き滅菌プレット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- * 綿100%の脱脂綿を球状に加工したものに紐を取り付けたものである。本品は酸化エチレンガス滅菌を行っている。

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- 1)適当な大きさの容器に本品を処置に必要な量を入れ、消毒薬等を含浸させる。清潔なピンセット等で把持し、処置部分に塗布する。
- 2)適当な大きさの容器に本品を処置に必要な量を入れ、清潔なピンセット等で把持し、体液等を吸収させる

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1)本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2)包装開封後、速やかに使用すること。
- * 3)包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- * 2.使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包装】

- * 本品は別注製品であるため、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社
* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社