

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

ハクゾウ S P ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1. 再使用禁止
- ＊ 2. 体内に留置しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- ＊ レーヨン 100%の不織布製品である。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- ＊ 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- ＊ 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ＊ 2.使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社
- ＊ 住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 - 電 話：06-6942-0451(代)

製 造 業 者：株式会社リブドゥコーポレーション