

円柱スポンジ G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。
- 電気メス等を近付けないこと。[引火するおそれがある]

【形状、構造及び原理等】

綿 100%の発泡体を円柱状に加工し、生理食塩水で湿らせたものである。X線を検知できる糸及び柄を取り付け、高圧蒸気滅菌を行っている。

〔X線造影材〕

名 称	成 分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- * 袋から取り出し、不潔にならないように注意して取り出し、出血の制御、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官保護のため用いる

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 包装開封後、速やかに使用すること。
- 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社
* 住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話：06-6942-0451(代)
製 造 業 者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社