

滅菌プレット NEO

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。
- X線造影糸を直接挟んで使用しないこと。[切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある]
- 電気メス等を近付けないこと。[引火するおそれがある]

【形状、構造及び原理等】

脱脂綿を球状に加工したものに、X線を検知できる糸を取り付けたものである。また、エチレンオキシドガス滅菌を行ったものである。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・ポリプロピレン（固定材） ・ウルトラマリン（着色剤）

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から無菌的に取り出し、直ちに適宜使用する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 包装開封後は、速やかに使用すること。
 - 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品として使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 使用期限
本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証(自社データ)による]

【包装】

本品の容器若しくは被包に内容量又は入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社
住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話 : 06-6942-0451(代)

製造業者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社