

器(54) 医療用捲綿子  
一般医療機器 医科用捲綿子 JMDNコード 10172000

# ドクター ヒュービー ポート クリーナー

## 再使用禁止

### 【警告】

- ・使用中に過度に引っ張る等の負荷を加えないこと。  
[脱脂綿が脱落する可能性があるため。]

### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

内視鏡手術において、体内に装着したトロッカーの清掃を体組織に触れうる方法で行うことを目的とした器具で、紙軸の先端に脱脂綿を巻きつけたものであり、酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行っている。

#### 2. 寸法

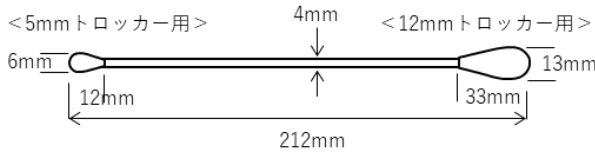

#### 3. 原材料

脱脂綿、紙、ポリビニルアルコール(糊剤)、グリセリン(糊剤)

#### 4. 原理

内視鏡手術において、体内に装着したトロッカーに挿入し、体液で汚れたトロッカー内部を先端の脱脂綿により清掃する。

### 【使用目的又は効果】

内視鏡手術において、体内に装着した機械器具(トロッカー)の清掃を体組織に触れうる方法で行うことを目的とした器具で、これにより手術時の内視鏡の汚れを低減する。

### 【使用方法等】

内視鏡手術において、内視鏡を引抜いた状態のトロッカーに本品を挿入し、トロッカー内部を清掃する。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意  
包装開封後、速やかに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)