

## ロトブロックス

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

形状：

ストレートタイプ（エクストラファイン）



コニカルタイプ（ファイン）



軸の形状：ISO 1797-1:2011 Type 1 (CA)

材質：（ブラシ）ナイロン

### 【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師が歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

### 【使用方法等】

- (1) コントラアングルハンドピースに装着する。
- (2) 清掃、研磨を行う。
- (3) 回転数：1,000rpm 以下

「使用方法に関連する使用上の注意」

- (1) 本品を接続する歯科用ハンドピースは、以下の内容に適合する機器に限定する。
  - ・ 本品を確実に把持することが可能である。
  - ・ 使用中、規定する回転数での制御が可能である。
- (2) 接続する機器の取扱説明書等に従って軸を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- (3) 予め患者の口腔外で回転させ、振れがないことを確認すること。
- (4) 破損や過剰な発熱の原因となるため、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- (5) 上記の回転数を超えて使用しないこと。
- (6) ブラシ部分を曲げた状態で回転させないこと。ブラシワイヤーが破損する原因となる。
- (7) ハンドピースを逆回転させないこと。

### \*【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 作業時には、目の損傷及び飛沫感染を防ぐために保護メガネ、マスク等を着用すること。
- (4) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (6) 使用後は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- (3) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- (4) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社  
電話番号 072-735-7101

製造業者：Hager & Werken GmbH & Co. KG  
（国名：ドイツ）