


スケーラーブラシ

【形状・構造及び原理等】

形状

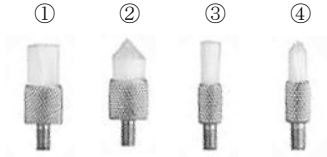

形状	径サイズ	毛の形
①	レギュラー	フラット
②	レギュラー	テーパード
③	ミニ	フラット
④	ミニ	テーパード

材質：（軸）ステンレス鋼 （毛）ナイロン

【梱包】

10 本／50 本

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

- ・本品と適合する歯科用エアースケーラのブラシホルダーに装着する。
- ・歯科用エアースケーラの説明書に従い使用する。
- ・使用後は適切に洗浄、滅菌する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ブラシホルダーに確実に装着し、動かないことを確認すること。
- ・予め患者の口腔外で空振動させ、振動、音、温度（発熱）等に異常を感じたら使用を中止すること。
- ・振動中、スケーラーブラシに長時間触れたりつまんだりしないこと。
- ・無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、磨耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- ・作業時には、目の損傷及び飛沫感染を防ぐために保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

- ・接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後洗浄又は消毒する際、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・使用後は直ちに流水洗浄すること。
- ・機器に付着した血液、組織、歯科材料等は、中性の洗浄液への浸漬等により除去し、乾燥させないこと。
- ・超音波洗浄装置で 5～10 分間洗浄すること。詳細は超音波洗浄装置の説明書に従うこと。
- ・洗浄後は精製水で十分すすぎ、乾燥させること。
- ・高圧蒸気滅菌すること。詳細は高圧蒸気滅菌装置の説明書に従うこと。例：135℃で 5 分
- ・本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時（乾燥時を含む）は、135℃以上に加熱しないこと。
- ・超音波洗浄時あるいは高圧蒸気滅菌時に、機器どうしを接触させないこと。
- ・乾燥させてから保管すること。
- ・滅菌、使用は 10 回までとすること。
但し、使用前に点検し、破損や劣化が確認された場合は、使用回数にかかわらず再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 072-735-7101

製造業者：*Premium Plus China Limited
（国名：中華人民共和国）