

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード 70976000

アクアソース ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- *ニトリルゴムによるアレルギー反応を起こすおそれのある医療関係者の使用及び患者への使用はしないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Multisafe Sdn. Bhd. (国名：マレーシア)

【形状・構造及び原理等】

*本品はニトリルゴムを主原料とし、左右の手に装着し、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する使い捨ての検査・検診用手袋である。

主材料：ニトリルゴム

寸法 (mm)：

サイズ	全長	厚さ (指部)	厚さ (掌部)	幅
XS	240 以上	0.09 以上	0.07 以上	75 ± 5
S				*85 ± *5
M				95 ± *5
L				*105 ± *5

左右兼用、粗面、パウダーなし、未滅菌

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。

【使用方法等】

取り出し口より手袋を取り出し、装着する。

【使用上の注意】

- かゆみ、発赤、かぶれ等のアレルギー性症状を起こした場合には、使用を中止し、*水でよく流してから医師に相談すること。
- 使用前に必ず製品の点検をし、汚れ、破損、ピンホール、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- 適切なサイズを使用すること。
- 刃物等の鋭利な器具や熱いものに触れると、破れたり穴があく可能性があるので注意すること。
- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるため、確認の上、注意して使用すること。
- 複数の患者に使用しないこと。
- 手術用手袋ではないため、手術には使用しないこと。
- 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温、低温、多湿、直射日光、蛍光灯、紫外線、X 線、オゾン、水分（水漏れ）を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

【使用期間】

3 年間 【自己認証（製造業者データ）による】