

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード 70682000

ミキシングプラス

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

当製品は、専用カートリッジ（別売）に取り付けるためのアダプターを有する練和、吐出用のチップである。

【形状】

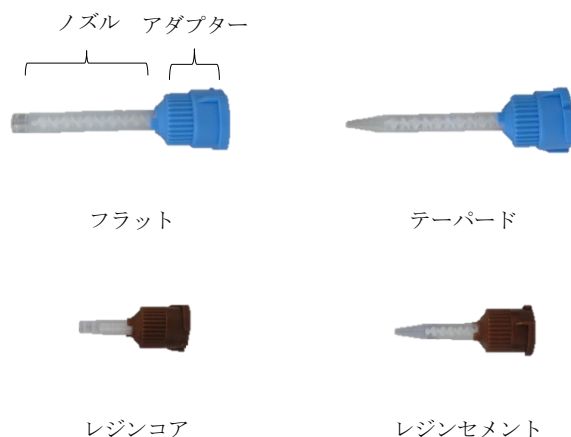

【寸法（全長）】

タイプ アダプターの色	フラット		テーパード	
	ショート	ロング	ショート	ロング
ライトブルー (SSS)		58.0mm	63.5mm	76.5mm
イエロー (SS)	50.1mm	69.5mm		
ピンク (S)	59.4mm	82.5mm		
グリーン (L)	67.6mm	88.5mm		
パープル (LL)		91.5mm		

タイプ アダプターの色	レジンコア		レジンセメント
	ショート	ロング	
ブラウン	30.6mm	33.4mm	39.7mm

【材質】

構成名称	原材料名	分量 (%)
外筒	ポリプロピレン	100
羽	ポリアセタール (フラットショートはポリプロピレン)	100

【使用目的又は効果】

当製品は歯科材料を練和又は混和する器具であり、注入機能を有する。

【使用方法等】

- (1) ディスペンサー（別売）に専用カートリッジ（別売）を装着する。
- (2) 専用カートリッジ（別売）のキャップを外しペーストを少量押し出して、2種類のペーストが均等に吐出されることを確認する。
- (3) 専用カートリッジ（別売）にミキシングプラスを装着し、時計方向に 90° 回転させロックする。
- (4) ディスペンサー（別売）のレバーを引いて専用カートリッジ（別売）内の材料を押し出す。
- (5) ミキシングプラスを取り外す場合には、反時計方向に 90° 回転させ引き抜き、専用カートリッジ（別売）にキャップをする。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

- (1) ミキシングプラスが専用カートリッジ（別売）に確実に装着されている事を確認してから材料の押し出しを行うこと。
- (2) ペーストを押し出す時に、抵抗が感じられる場合は、過度の圧力をかけずにミキシングプラスの交換等を行うこと。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をし、損傷、変形、変質等のあるものは使用しないこと。
- (2) 本品に適合しないカートリッジ（別売）には使用しないこと。
- (3) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (4) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 072-735-7101

製造業者： Sulzer Mixpac AG
(国名：スイス)