

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDNコード 70907000

グローブラシ

【禁忌・禁止】

金属に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴ある医療従事者及び患者への使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

下記の3種類がある。



（左から、カップ、フラット、ポイント）

材質

軸部：銅

ブラシ：シリコンカーバイド

【梱包】

単品：12本入り

キット：3種類×各5本入

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- (1) 本品の軸部を適合する歯科用ハンドピースに装着する。
- (2) 回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し当てて、研磨剤を使用せずに研削、研磨する。
- (3) 最大回転数(rpm)：5,000

【使用方法に関する使用上の注意】

- (1) 上記使用最大回転数を超えて使用しないこと。
- (2) 本品を歯科用ハンドピースに確実に装着し、固定されていることを確認すること。
- (3) 使用する歯科用ハンドピースの取扱説明書の記載内容に従って使用すること。
- (4) 予め患者の口腔外で回転させて、振動、音、温度（発熱）等に異常を感じた場合は使用を中止すること。
- (5) 回転中、本品に長時間触れないこと。
- (6) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 作業時には、目の損傷及び飛沫感染を防ぐために保護メガネ、マスク等を使用すること。
- (4) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (6) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- (3) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- (4) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後洗浄又は消毒する際、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を使用すること。
- (2) 機器に付着した血液、体液、組織等は、乾燥し、固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。
- (3) 洗浄剤/消毒剤を使用する際は、防錆性の洗浄剤/消毒剤を使用し、使用する洗浄剤/消毒剤の取扱説明書の記載内容に従って洗浄/消毒すること。
- (4) 超音波洗浄装置で5～10分間洗浄すること。詳細は超音波洗浄装置の説明書に従うこと。
- (5) 洗浄後は精製水で十分すすぎ、乾燥させること。
- (6) 高圧蒸気滅菌すること。詳細は高圧蒸気滅菌装置の説明書に従うこと。例：134℃で5分。
- (7) 本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時（乾燥時を含む）は、135℃以上に加熱しないこと。
- (8) 洗浄、消毒装置あるいは高圧蒸気滅菌装置を使用する際は、機器どうしを接触させないこと。
- (9) 乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社

電話番号 072-735-7101

製造業者：Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd.

（国名：中華人民共和国）