

LUNOS プロフィーペースト

【禁忌・禁止】

本材に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

外観



(写真は製品の一例です。)

性状：ペースト

原材料：

Two in One 1本でポリッシングまで可能

種類	成分	
オレンジ	ケイ酸塩、グリセリン、ハイドロキシアパタイト、pH調整剤、防腐剤（フェノキシエタノール、パラベン）、増粘剤、乳化剤、水	香料、着色剤
ミント		フッ化ナトリウム(1500ppm)、ペパーミントオイル、着色剤
ナチュラル		

(RDA 28)

SuperSoft インプラントや乳歯のお手入れに最適

種類	成分	
オレンジ	ハイドロキシアパタイト、グリセロール、水、増粘剤、防腐剤（フェノキシエタノール、パラベン）、乳化剤	香料、着色剤
ナチュラル		

(RDA<5)

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

- (1) 適切なペーストを選択する。(研磨効率(RDA)を参照)
- (2) ペーストを使用する分だけ容器に取り出す。
- (3) 歯磨カップや歯科治療用ブラシに少量をのせる。
- (4) ハンドピース等を用いて低速回転にて歯面を清掃・研磨する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

本製品の使用により発疹、湿疹、発赤等の過敏症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

- ・本製品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・研磨効果のある製品なので、適切な量を使用すること。
- ・ペーストの飛散及び熱の発生による口腔内損傷を防ぐため、低速回転で使用する。
- ・ペーストが飛散する恐れがあるので、保護眼鏡やマスクを使用すること。
- ・本製品は、歯科の医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び使用期限】

[保管方法]

- ・高温多湿を避けて、25℃以下の室温で保管すること。
- ・直射日光の当たる場所には保管しないこと。
- ・歯科の医療有資格者以外は触れないように、適切に保管すること。

[有効期限・使用期限]

包装に記載。

(例：2020-03 は 2020 年 3 月を示す。)

[記載の使用期限は製造業者データによる]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 072-735-7101

製造業者：Orochemie GmbH + Co. KG
(国名：ドイツ)