

一般医療機器 単回使用クラス 1 処置キット JMDN コード 33961001

滅菌ディスポインストルメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者 : Cangzhou lankang medical instruments developing
Co., Ltd
(国名：中華人民共和国)

【形状・構造及び原理等】

材質：ABS、ステンレス鋼

形状：

(1) ミラー



(2) エキスプローラー



(3) ピンセット



【使用目的又は効果】

口腔内の診察及び診断を行うために用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を把持し、口腔内の診察及び診断を行う。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 本品は単回使用品であるため、再使用しないこと。
- (3) 個包装内に異物を発見した場合は、使用しないこと。
- (4) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (6) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。