

を行わないこと。

- (6) 顕微鏡本体がキャスタースタンドに取り付けられ、ネジが締まっていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管環境条件＞

- (1) 温度：-40℃～55℃
- (2) 相対湿度：10%～80%
- (3) 気圧：500hPa～1060hPa

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は感染に十分注意しながら、血液、体液、組織等の汚れを除去すること。表面は湿らせた布で拭くことができますが、刺激性や腐食性のある洗浄剤は使用しないこと。ふき取りの際は電源を切って行うこと。
- (2) システムに付着したほこりはブロアーや柔らかいブラシで除去すること。
- (3) 使用後はカバーをかけるなどし、埃が付着しないよう保管すること。
- (4) 長期間使用しなかった場合は、使用前に機器が正しく正常に機能するかを必ずチェックし、安全確認を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者 : Alltion (Guangxi) Instrument Co.,Ltd.
(国名：中華人民共和国)