

器 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード 70682000

ミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

■ミキシングチップ

【形状】



【種類】 イエロー
ピンク
グリーン
パープル

【材質】（外筒）ポリプロピレン
（羽）ポリアセタール

**【梱包】 48 本

■イントラオーラルチップ

ミキシングチップ イエローに装着する。

【形状】



【材質】 ポリエチレン

**【梱包】 48 本

■バイトチップ

ミキシングチップ グリーンに装着する。

【形状】



【材質】 ポリエチレン

**【梱包】 48 本


【使用目的又は効果】

歯科材料を練和又は混和する器具であり、注入機能を有する。

【使用方法等】

- (1) 対応するカートリッジ製品の添付文書に従い、ディスペンサーD2（別売、届出番号 27B2X00268Z00002）にカートリッジを装着し、カートリッジのキャップを外し、ペーストを少量押し出して、材料が均等に出ることを確認する。

- (2) カートリッジにミキシングチップを装着し、時計方向に 90° 回転させてロックする。必要に応じてミキシングチップにイントラオーラルチップあるいはバイトチップを装着する。
- (3) ディスペンサーD2 のレバーを引いて、カートリッジ内の材料を押し出す。
- (4) カートリッジからミキシングチップを外し、カートリッジのキャップをする。

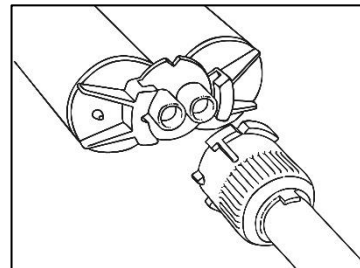

「使用方法に関連する使用上の注意」

- (1) ミキシングチップがカートリッジに確実に装着されていること、またイントラオーラルチップ又はバイトチップがミキシングチップに確実に装着されていることを確認してから、材料の押し出しを行うこと。
- (2) イントラオーラルチップの先端は尖形なので、取扱いに注意すること。
- (3) カートリッジ及びディスペンサーD2 の取扱いについては、各々の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 破損、磨耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (4) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (5) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 072-735-7101

製造業者：Sulzer Mixpac AG
（国名：スイス）