

エリートトランスペアレント

【形状・構造及び原理等】

- 【形 状】 ペースト状
- 【主成分】 ポリビニルシロキサン、二酸化ケイ素
- 【原 理】 ベースとキャタリストを練和することにより、付加重合反応が進行して硬化する。
- 【付属品】 ミキシングチップ（届出番号 27B2X00268Z00001）
- 【包装】 セット
カートリッジ（ベース＋キャタリスト） 50ml
ミキシングチップ イエロー 6 本

【使用目的又は効果】

合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いる。

【使用方法等】

- (1) ディスペンサーD2（別売、届出番号 27B2X00268Z00002）にカートリッジを装着する。
- (2) カートリッジのキャップを外し、ペーストを少量押し出して、ベースとキャタリストが均等に出ることを確認する。カートリッジの口を拭き取る。
- (3) ミキシングチップを装着し、時計方向に 90° 回転させてロックする。
- (4) ディスペンサーD2 のレバーを引いて、一定の速度でペーストを注入する。
- (5) カートリッジからミキシングチップを外し、キャップをする。
- (6) 操作時間（23℃）：約 90 秒
硬化時間（23℃）：約 15 分

「使用方法に関連する使用上の注意」

- (1) 操作時間及び硬化時間は、製品の保管状況、室温、湿度等により変化するので、硬化を確認してから、印象を取り外すこと。
- (2) 取り外したキャップは再びカートリッジの封とするため、清潔に扱うこと。
- (3) カートリッジからペーストが出ない場合は、注出口を確認し、硬化物がある場合は取り除くこと。
- (4) ペーストを押し出す際に抵抗が感じられる場合は、過度の圧力をかけずに、ミキシングチップの交換等を行うこと。
- (5) 気泡の混入を避けるため、ミキシングチップの先端をペーストに入れたままペーストを注入すること。
- (6) 本品と接触する模型等の表面は、油分や汚れを除去し、乾燥させること。
- (7) 本品を他のシリコン系印象材と接触させる場合は、別売の分離材を塗布すること。
- (8) ディスペンサーD2 の取扱いについては、ディスペンサーD2 の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

- (1) 本品あるいは類似の成分に対して発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- (2) 本品又は練和物が目に入らないように注意すること。目に入った時は、直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

- (3) 硬化遅延を起こすため、ラテックス製手袋を使用しないこと。ラテックス製手袋が触れた手、歯牙、模型等を介した間接的な接触でも硬化遅延を起こすことがあるため、注意すること。
- (4) 本品は衣服に付着すると除去できないので、付着させないこと。
- (5) 使用前に必ず製品の点検をし、破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (6) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (7) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (8) 廃棄の際は、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- (1) 高温、多湿、直射日光を避けて、5～27℃で保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【有効期間】

包装に記載の使用期限までに使用すること。

（例：☞ 2013-10 は 2013 年 10 月を示す）

【記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による】

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：ZHERMACK S.p.A.
（国名：イタリア）