

医療用品 03 手術用手袋および指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

## ナビロール医療ニトリル手袋

### 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム(ニトリルゴム)製、左右兼用、未滅菌、パウダー(潤剤)の付いていない検査・検診用使い捨て手袋である。

#### <仕様>

検査項目	老化前	老化後
引張強さ(MPa)	14	14
切断時伸び(%)	500	400

\*全長: 約240mm

#### 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

#### 【使用方法等】

包装箱より手袋を取り出し、丁寧に手に装着し使用する。

#### 【使用上の注意】

1. 使用注意
  - ・使用前、使用中には、手袋にひび割れ、ピンホール、破れなどが無いことを必ず確かめ、異常が認められる場合は使用しないこと。
  - ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合は、使用を中止すること。
2. 重要な基本的注意
  - ・爪先、刃物等、とがった物に接触すると、破れや穴があくことがあるので注意すること。
  - ・液体が付着すると滑りやすくなるので注意すること。
  - ・使用後は感染防止に留意し、適切な方法で処分すること。
3. 相互作用
  - ・薬品、溶剤等によっては、膨潤、浸透、変質する場合がありますので確認の上、使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
  - ・水ぬれに注意すること
  - ・高温、多湿、紫外線の影響で品質が劣化するので、直射日光、蛍光灯が当たる場所、コピー機などのOA機器周囲を避け、風通しの良い涼しい場所で貯蔵、保管すること。
2. 有効期間  
製造後3年[自己認証(製造元データ)による]  
使用期限は包装箱に記載する(包装箱裏面)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
アズワン株式会社  
TEL: 0120-711-875  
受付時間: 平日9:00~17:30(土日祝・弊社休業日は除く)

\*\*製造業者 Sri Trang Gloves (Thailand) Public Co., Ltd.  
(スリトラン グローブズ パブリック社)  
製造国名 タイ