

歯08 歯科用石膏及び石膏製品  
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN70897020  
ニューラシオストーン

【形状、構造及び原理等】

本材は、下記成分により構成される。  
1) 性状：粉末  
2) 成分：石こう、着色剤、その他  
3) 色調：ブライトイエロ一色

【使用目的、効能又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質石こうをいう。

【品目仕様等】

- 1) 混水比：水24ml/粉末100g(標準)  
2) 物理性能：JIST6605による

標準混水比	0.24
硬化時間	7分
硬化膨張	0.07%
圧縮強さ	1時間後 42.0Mpa
	乾燥後 83.0Mpa

【操作方法又は使用方法】

- 1) 混水量は粉末100gに対して水24mlが標準です。  
\*\* 2) 練和時間は50~70秒間、むらなく均一に練和してください。  
3) 印象に注入後、アルジネート印象材では約30分、ラバーベース印象材では約45分で模型を取り出すことができます。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意  
・本材を扱う際(硬化体を研削する場合も含む)には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。  
・本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。  
・本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。  
・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。  
  
2) 重要な基本的注意  
・本材が目に入らないように注意すること。万一に入った場合は、すぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。  
・本材の使用により、発疹や皮膚炎など過敏症状が表れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法  
・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。  
・開封後は、密閉容器などに移し替え、乾燥状態にて保管すること。  
・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。  
  
2) 有効期間・使用期限  
・本材は、包装に記載の使用期限※までに使用すること。  
[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]  
※(例：“09.08”とは、使用期限2009年8月末日を示す)

【包装】

- ・1.5kg入ラミ袋×4/化粧箱入(計6kg)  
・1.5kg入ラミ袋×2+保存容器/化粧箱入(計3kg)