

V i s c oサージカルスポンジ

再使用禁止

【警告】

- ・使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。〔期待する性能が得られない恐れ〕
- ・保存中は室温（1～30℃）に注意し、密封容器に入れて保管すること。〔期待する性能が得られない恐れ〕
- ・包装から取り出した製品は、そのまま放置せずできるだけ早く使用すること。〔滅菌効果が損なわれる恐れ〕

使用上の注意・警告

- ・使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。
- ・ポリエステル糸を持って引っ張らないでください。
- ・本品は使い捨て製品です。再滅菌又は再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

V i s c oサージカルスポンジは、非常に柔らかい材質を使って薄い構造になっています。そして色々なサイズに対応していますので、加工する必要がありません。X線非透過成分を含んだポリエステルの糸を圧着させて、使用後の取り除き忘れを防止します。

外観



標準型スポンジ

モデル番号	寸法 (mm)	モデル番号	寸法 (mm)
700101	0.6 x 0.6	700113	13 x 20
700102	0.6 x 12	700114	13 x 38
700103	0.6 x 40	700115	13 x 50
700104	10 x 10	700116	15 x 30
700105	10 x 15	700117	15 x 50
700106	10 x 20	700118	20 x 20
700107	10 x 40	700119	20 x 40
700108	10 x 70	700120	20 x 70
700109	12 x 25	700121	25 x 50
700110	12 x 40	700122	30 x 60
700111	12 x 70	700123	40 x 70
700112	13 x 13	700124	70 x 70

脊柱型スポンジ

モデル番号	寸法 (mm)
700201	0.6 x 0.6
700202	0.6 x 12
700203	10 x 10
700204	10 x 20
700205	13 x 13
700206	13 x 20
700207	20 x 20

コーティングスポンジ

モデル番号	寸法 (mm)
700301	10 x 40
700302	10 x 70
700303	12 x 25
700304	15 x 70
700305	20 x 40
700306	20 x 70

【使用目的、効能又は効果】

使用目的

外科手術などの際の出血を抑えたり、液体の吸収あるいは器官を乾燥又は汚染から守るため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内蔵構造に適用することを目的とします。

効能又は効果

滲出する血液、体液を迅速に吸収して器官を保護し、汚染を防ぎます。

X線検知可能な成分を含んでいますので、使用後の取り忘れを防止します。

【品目仕様等】

原料・薬品及び分量

1枚（7cm x 7cm）当たり

・吸収剤（ビスコス）：0.7g

・凝集剤（ポリアミド）：0.2g

・非吸収性外科用糸の長さ：14cm以上

【操作方法又は使用方法等】

使用方法

外科手術などの際、患部からの出血や体液の滲出を防ぐために、本品を患部に付着させて、血液や体液を本品に吸収させた後取り除きます。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

密封容器に入れて、室温（1～30℃）で保存します。

有効期間・使用の期限（耐用期間）

製造日から36ヶ月

【包装】

自社包装単位

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：GEMSS JAPAN 株式会社

住所：大阪府大阪市淀川区西中島六丁目3番32号

電話：06-6476-7145

FAX：06-6476-7146

製造業者名：SOMYOUNG MEDICS

住所：505, Startower, 223-25, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea