

一般医療機器 医04 整形用品
医療用不織布 JMDN 34655000

メディコム バイタル 不織布ガーゼ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布ガーゼで
不織布の網目構造により血液・体液等を吸収しやすくしたもの。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- 製造後3年

【使用目的又は効果】

創傷面の保護、血液・体液等の吸収または薬剤の塗布等に使用する。

【品目仕様等】

白色でにおいはほとんどなく、著しい異物を含まない。
4つ折り、正方形
自重の約 8～10倍量の水を吸収する。
用途によりサイズを選定。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル801
TEL 078-327-2333

【使用方法等】

適宜滅菌してご使用ください。

外国製造所国名 : 中華人民共和国

外国製造業者 : A.R. Medicom Inc. Shanghai Ltd.

【使用上の注意】

「重要な基本的注意」

- 本品は使い捨てですので、再使用しないでください。
- 箱に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないでください。
- 肌の弱い方の場合、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。
このような症状があらわれた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- 体内へ留置しないこと。