

一般医療機器 医04 整形用品
医療用不織布 JMDN34655000

コスパ 不織布ガーゼ

【警告】 再使用禁止・未滅菌

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布ガーゼで不織布の網目構造により血液・体液等を吸収しやすとしたもの。
外観: 白色で匂いはほとんどなく、著しい異物を含まない。
寸法: 表示寸法 \pm 10%
蛍光増白剤: 全面に染着された蛍光を認めない。

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護、血液・体液等の吸収または薬剤の塗布等に使用する。

【使用方法等】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、適宜滅菌してご使用ください。

【使用上の注意】

- 本品は使い捨てですので、再使用しないでください。
- 箱または紙包装に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないでください。
- 肌の弱い方は場合は、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状があらわれた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- 体内へ留置しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
2. 使用の期限
 - 包装後3ヶ年

【包装】

200枚入/パック

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル801

TEL 078-327-2333

外国製造所国名 : 中華人民共和国

外国製造業者 : A.R. Medicom Inc. Shanghai Ltd.