

一般医療機器 医 04 整形用品  
医療脱脂綿 JMDN70975000

## セーフベーシック コットンロール

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

- 綿 100%素材のデンタル用ロール綿
- 使い捨てタイプ
- 8 mm径及び 10 mm径の円柱形ロール
- 天然綿の吸水性を利用し体液等を吸収する。

### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする。

### 【使用方法等】

未滅菌の為、適宜滅菌してご使用ください。

### 【使用上の注意】

「重要な基本的注意」

- 本品は使い捨ての為、再使用はしないでください。
- 箱又は包装等に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないでください。
- 肌の弱い方の場合、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- 体内に留置しないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
  - 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
2. 有効期間
  - 上記条件のもとで包装後 3 年

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド  
〒650-0033  
兵庫県神戸市中央区江戸町 96 番地ストロークビル 801  
TEL 078-327-2333

外国製造所国名：中華人民共和国

外国製造業者：A. R. Medicom Inc. Shanghai Ltd.