

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000

ドクターガード ニトリルグローブ バイオレット

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 非天然ゴム製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを含まない手に優しいニトリルゴム製のパウダーフリータイプ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌
- S, M, Lの3サイズ



【品目仕様等】

- 色 調：バイオレット
- 老化前：引張強さ 14MPa 以上
切断時伸び 500%以上
- 老化後：引張強さ 14MPa 以上
切断時伸び 400%以上

【使用目的又は効果】

検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し左右の手に装着する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 複数の患者には使用しないでください。
 - 合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
 - 包装が破損していたり、汚損していたり、ピンホール、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。

- 本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。

2. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所を避けて常温で保管すること。

- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

2. 有効期間

- 上記条件の下で製造後5年間（製造元データによる）使用期限は、包装箱に記載する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル801
TEL 078-327-2333