

＊ ＊ 2020年 7月改訂（BD第4版）  
＊ 2020年 2月改訂（BD第3版）

製造販売届出番号：28B3X10006000024

## 機械器具 54 医療用捲綿子

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

# FLOQスワブ552C(チューブ入り)

## 再使用禁止

【禁忌・禁止】  
●再使用禁止

## ＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

### 1. 形状・構造

本品は、プラスチック製の軸の先端部にポリアミド製の繊維を取り付けた綿棒であり、軸側にはキャップ機能を設け、検体採取後の綿棒を格納・輸送できる外装チューブに包装されています。


材質 綿球：ポリアミド（淡黄色）  
軸：ポリスチレン（白色半透明）  
外装チューブ：ポリプロピレン  
キャップ：ポリエチレン  
寸法 綿棒全長：151 mm 軸直径：2.5 mm  
綿棒長：16 mm 綿球直径：4.5 mm  
外装チューブ包装状態の全長：175 mm

### 外観図

外装チューブ包装状態（未開封） キャップは赤色



開封後の綿棒と外装チューブ

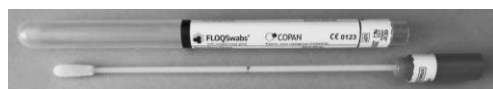

### 2. 滅菌・外装チューブ等

本品は外装チューブとともに滅菌済みです。

## 【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取する器具です。  
主に咽頭からの検体採取に適しています。

## 【使用方法等】

外装チューブの封印部分を開封し、綿球に触れないように、キャップを持って綿棒を取り出し、そのまま検体の採取に使用します。検体を採取した後、綿棒をチューブに挿し戻し、しっかりとキャップをしてください。必要に応じて、採取検体に関する情報を外装チューブのラベルに記載します。

## 【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は1回限りです。再使用はできません。
- 2) 本品は滅菌済みですので、個々の外装チューブに破損や汚染の疑いがある場合は使用しないでください。また、開封後は、速やかに検体採取を行ってください。
- 3) 本品に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れ等があった場合は使用しないでください。
- 4) 検体採取時、軸部分（特に軸の細い部分）に力がかかり過ぎる、強く押す、過度の振れ負荷がかかるような使い方はしないでください。

ださい〔軸が折れる可能性があるため〕。また、軸を曲げる、反らす、折る等の意図的な変形を加えないでください。

- 5) 挿入部位において、あきらかに通常より挿入距離が短い位置で軸に強い抵抗を感知する等の場合には、挿入操作を続けしないでください。
- 6) 臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具（眼鏡、手袋、マスク等）を着用のうえ、充分に注意して操作を行ってください。
- 7) 本品の使用後の廃棄にあたっては、滅菌処理を行い、関連する法律や規定に従って処分してください。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
2～30℃で、濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管してください。
2. 使用期限  
外箱及び外装チューブに、製造番号とともに記載してあります。

## ＊ 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社シン・コーポレイション

外国製造業者（国名）

Copan Italia S.p.A.

コパニイタリア社（イタリア）

販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1

お問い合わせ先

カスタマーサービス TEL：0120-8555-90