

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング JMDNコード:31724000
イーメイク むくみを予防する着圧ソックス

【警告】

- 適用対象(次の患者へ適用する際には特に注意してください)
 - 急性期の深部静脈血栓症患者。
[肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため。]
 - 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。
[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。]
 - 装着部位に知覚障害のある患者。
[痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。]
 - 糖尿病患者。
[無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、また症状を悪化させるおそれがあるため。]
 - 装着部位に極度の変形を有する患者。
[適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。]
 - 繊維に対して過敏症のある患者。
[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]
- 使用方法
重ね履きを行う場合は、医師がその必要性を判断して行ってください。
[適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

- 適用対象(次の患者には適用しないでください)
 - 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
 - 化膿性静脈炎の患者。
[菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は伸縮性により着用部に同心性の圧迫を加えるとともに、足首部分が最も圧迫圧が高く、上方に行くにしたがい圧迫圧が低くなるよう編み込まれている。



2. 圧迫圧

Aふともも部圧迫圧 < Bふくらはぎ部圧迫圧 < C足首部圧迫圧 < D甲部圧迫圧

部 位	圧迫圧(hPa)
A ふともも	15hPa
B ふくらはぎ	18hPa
C 足 首	20hPa
D 甲	21hPa

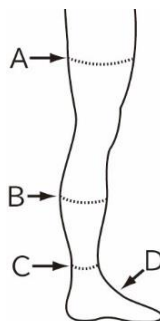

- 圧迫圧は各部位における参考値です。
- 患者の体型により圧迫圧は異なります。

3. 組成及び原産国

レーヨン48.5%、ポリエステル42.2%、ポリウレタン5.2%、絹2.9%、ナイロン1.2%
日本製

4. 形状及びサイズ

オーバーニーソックス(つま先なし)タイプ
フリーサイズ

5. 原理

本品は筋肉の収縮と弛緩の作用が弱まり循環の悪くなってしまった静脈血やリンパ液を、足首の圧迫圧を最も高くし段階的な圧迫圧の変化を与えることで、下から上に流れやすくするポンプに似た働きをする。

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

1. 適応サイズの選定

1)Aふともも、Bふくらはぎ、C足首の周囲径を計測し、サイズ表にて正しいサイズのものを選んでください。


測定部位		規格周囲径
A	ふともも周囲	44~58cm
B	ふくらはぎ周囲	30~40cm
C	足首周囲	19~25cm

2)サイズ適応外には使用しないでください。

2. 装着方法

装着する際は、爪や指先の荒れ、指輪等で本品を傷つけないように十分注意してください。


1)両手で本品をたぐりよせて、つま先を入れます。

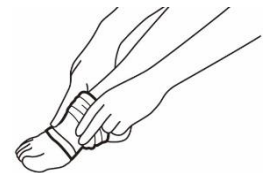

2)足首の所まで引き上げて、踵の位置を合わせます。



3)両手の親指を内側に入れて、均等に少しずつシワやねじれが無いようにソックスをひざ上まで左右交互に引き上げます。

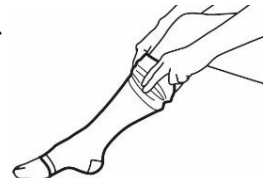

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用してください)
 - 1) 本品の使用により脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
[動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。]
 - 2) 「しゃがむ」等の姿勢をした時に圧迫圧が高くなり、静脈血が停滞しやすくなる可能性がありますので注意してください。
 - 3) ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にある患者。
[潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため。]
2. 重要な基本的注意
 - 1) 正しい圧迫圧を得るため、装着する下肢の規定部位を必ず計測して適応するサイズを選択してください。
 - 2) サイズ適応外の患者に使用しないでください。
[適正な圧迫圧が得られないため。]
 - 3) 本品を折り返して使用しないでください。
[血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。]
 - 4) 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやシワが無いように装着してください。本品が装着中にたるんだり、シワが寄ったり、ずれ落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなおしてください。
[適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。]
 - 5) 本品に破損(伝線、ほつれ、破れ等)が無いことを確認してから装着してください。
 - 6) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損(伝線、ほつれ、破れ等)する場合がありますので注意してください。
 - ① 少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着
 - ② 爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - ③ 肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
 - ④ 鋭利なものへの接触
 - 7) 本品をハサミで切るなどの加工又は修理は行わないでください。
 - 8) 1日数回皮膚や爪の色に変化が無いか確認してください。また1日1回は必ず脚全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。
 - 9) 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
 - 10) 本品は個人用の製品であり他人への使い回しはしないでください。
3. その他の注意
濃色の製品は素材の性質上汗や雨で湿った場合、摩擦により色落ちし他の衣料に色移りすることがありますので注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 1) 高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で室温保管してください。
 - 2) 白物及び淡色物の製品を開封した状態で長時間紫外線の照射を受けたり、高温湿度の場所に長時間保管されたりすると変色の原因になるおそれがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項
 - 1) 洗濯の際の注意事項
 - ① 水温30度以下で中性洗剤を使用して手洗いし、直射日光を避けて陰干ししてください。洗濯機を使用される場合は、洗濯ネットに入れて弱水流で洗ってください。
 - ② 繊維の劣化を避けるため、高温水、塩素系及び酸素系漂白剤、消毒剤、乾燥機、アイロンの使用、ドライクリーニング、滅菌は行わないでください。
 - ③ 濃色の製品は色落ちするおそれがあるため、白物及び淡色物と分けて洗濯してください。
 - 2) 洗濯後の注意事項
傷、ほつれ、繊維の劣化等が無いことを確認してから使用してください。

【包装】

1足(2枚)入り/個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:三ツ星靴下株式会社
〒635-0076 奈良県大和高田市大谷313
TEL 0745-23-1111

製造業者:三ツ星靴下株式会社 高田工場

販売名:イーメイク むくみを予防する着圧ソックス
製造販売届出番号:29B3X10003000011

取扱説明書を必ずご参照ください。