

メディカルソックス

【警告】

1. 次の方は医師と相談の上ご使用ください。
 - 1) 動脈血行障害やうっ血性心不全のある方。
 - 2) 高血圧、心臓、肝臓、腎臓等に障害のある方。
 - 3) 妊婦等の安静を必要とする方。
 - 4) 糖尿病等による高度の末梢循環障害のある方。
 - 5) 現在病気や怪我などによる脚のむくみやだるさを感じる方。
 - 6) 血行障害を起こしたことのある方。
 - 7) 繊維に対して過敏症のある方。


【禁忌・禁止】

1. 切り傷、打ち身、捻挫その他による出血時は使用しないこと。
2. 骨折、やけど、筋肉の組織破壊等に対しては使用しないこと。
3. 肌に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、伸縮性により着用部に同心性の圧迫を加えるとともに、足首部分が最も圧迫圧が高く、上方にいくにしたがい圧迫圧が低くなるよう編みこまれている。

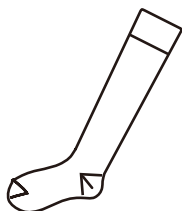

2. 圧迫圧

Aふくらはぎ部圧迫圧<B足首部圧迫圧

部 位		圧迫圧hPa
A	ふくらはぎ	15hPa
B	足 首	24hPa

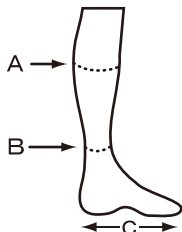

- 圧迫圧は各部位における参考値です。
- 患者の体型により圧迫圧は異なります。

3. 組成

綿、ナイロン、アクリル、ポリウレタン

4. 形状及びサイズ

ハイソックス（つま先あり）タイプ
M、L

5. 原理

本品は、筋肉の収縮と弛緩の作用が弱まり、循環の悪くなってしまった静脈血やリンパ液を、足首の圧迫圧を最も高くし、段階的な圧迫圧の変化を与えることで、下から上に流れやすくするポンプに似た働きをする。

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的とした医療用の弾性ストッキングです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有します。

【使用方法等】

1. サイズ測定


Aふくらはぎ、B足首の周囲径を計測し、サイズ表にて正しいサイズのものを選んでください。

サイズ		M	L
測定部位			
A	ふくらはぎ周囲	32cm～38cm	36cm～42cm
B	足 首 周 囲	19cm～23cm	21cm～25cm
C	足 底 丈	22cm～24cm	24cm～27cm

2. 着用方法

着用する際は、爪や指先の荒れ、指輪等で本品を傷つけないようご注意ください。


- 1) 両手で本品をたぐりよせて、つま先を入れます。

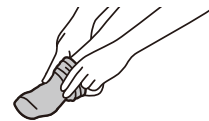

- 2) 足首まで引き上げてかかとの位置を合わせます。



- 3) 両手の親指を内側に入れ、均等に少しずつシワやねじれがないようにソックスをひざ下まで左右交互に引き上げます。

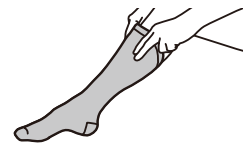

3. 本品は就寝時も着用できます。

【使用上の注意】

1. 本品の着用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚温の低下、皮膚や爪の変色、発赤、水疱、発疹、かぶれ、かゆみ等の異常及びその他着用前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに着用を中止すること。
2. サイズが合わないものや本品を折返したり、重ねての使用はしないこと。
3. しゃがむ等の姿勢をした時に衣服圧が高くなり、静脈血が停滞しやすくなる可能性がありますので、使い方には注意すること。
4. 連続使用により、伸びやゆるみが生じて適切な圧迫がかからない場合は、新品と交換をすること。
5. 濃色の製品は素材の性質上汗や雨で湿った場合、摩擦により色落ちし他の衣料に色移りすることがありますので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で室温保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗濯の際の注意事項

- 1) 弱い手洗い又は洗濯機（弱水流で洗濯ネット使用）にて、水温30度以下で中性洗剤を使用して洗濯し、直射日光を避けて陰干してください。
- 2) 繊維の劣化を避けるため、高温水、塩素系及び酸素系漂白剤、消毒剤、乾燥機、アイロンの使用、ドライクリーニング、滅菌は行わないでください。
- 3) 濃色の製品は色落ちするおそれがあるため、白物及び淡色の物と分けて洗濯してください。

【包装】

1足（2枚）入り／個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：三ツ星靴下株式会社
〒635-0076 奈良県大和高田市大谷 313
TEL 0745-23-1111

製 造 業 者：三ツ星靴下株式会社 高田工場

販 売 名：メディカルソックス
製造販売届出番号：29B3X10003000037
類別及び一般的名称等：理学診療用器具
一般医療機器
弾性ストッキング JMDN コード：31724000