

類別：機械器具16 体温計
管理医療機器 一般の名称：電子体温計（JMDN 14032010）
販売名：電子体温計T O - 2 0 4

【警告】

・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】

- ・測温部を噛まないでください。
- ・人以外の検温にはご使用にならないでください。
- ・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。


【形状・構造及び原理等】

1.構成


・正面

測温部 本体カバー 表示部 電源ボタン

・背面

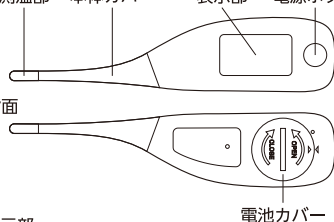

2.表示部

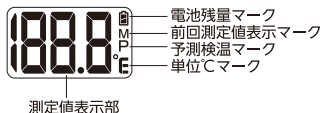

測定値表示部

3.本体の寸法および質量

寸法 長さ135×幅31×厚15 mm

質量 約22g(電池含む)

4.電気的定格

定格電圧：DC3.0V 電源：リチウム電池 CR2032

電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器

電源に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部

5.原理

脇下的場合

測温部にあるサーミスタが温度により電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、体温の上昇から推測した予測値として表示する

口腔・舌下の場合

測温部にあるサーミスタが温度により電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、その計測値を実測値として表示する

6.原材料（体に接触する部分）

測温部：SUS304

本体カバー：測温部側/TPE、表示部側/ABS

7.付帯機能

初期動作確認告知機能、予測成立告知機能、実測検温終了告知機能、測定温度範囲外告知機能、オートパワーオフ機能、前回測定値表示メモリー機能

8.品目仕様

温度測定範囲：32.0℃～42.9℃

測定精度：±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)

使用環境：10℃～40℃、30%～85%RH(結露なきこと)

【使用目的又は効果】

測温部を部位に接触させて、脇下および口腔(舌下)の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。

【使用方法等】

・わき下の場合

(1) 電源ボタンを押す。

- (2) “ビツ”音の後に表示部の全セグメントが表示される。その後、表示部に“M” “P” “C”と前回測定値が約2秒間表示される。
- (3) 表示部に“L”が表示され、予測検温マーク“P”が点灯し“C”の点滅が開始し、測定可能となる。
- (4) 測温部を脇下に密着させ安静にする。
- (5) 予測検温の場合：測定開始後、約15秒後にバックライトが点灯し、ブザー音が鳴ったら、予測検温が終了した合図で、表示部に予測検温された体温が表示される。
- (6) 実測検温の場合：予測検温終了後も測定を続けると約1分30秒で予測検温マーク“P”が消え、同時に“C”点灯から“C”点滅になる。約6分30秒でバックライトが点灯し、ブザー音が鳴ったら、表示部に実測検温された体温が表示される。
- (7) そのまま検温を続けて、約13分後にブザー音が1回鳴り、約5秒後電源がOFFになる。

・口の中(舌下)の場合

- (1) 口の中で測る場合は、実測検温のみとなる。
- (1) 測定開始から約15秒後にバックライトが点灯し、ブザー音が鳴っても、そのまま検温を続ける。
- (2) 測定開始から約6分30秒でバックライトが点灯し、ブザー音が鳴ったら実測検温が終了した合図で、表示部に実測検温された体温が表示される。
- (3) 電源ボタンを押して電源を切る。

【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動、食事、入浴の後には十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3) 本体を強くこまさないでください。
- (4) 体温以外の測定及び人以外の検温に使用しないでください。
- (5) 本体に傷や破損がないこと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2) ご使用後は、乾いた布等で測温部を拭き、清潔な状態で保管ケースへ収納し、保管してください。
- (3) 標準的な使用期間の目安：5年(自己認証による)

【取扱上の注意】

- (1) 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意等を厳守してください。
- (2) 電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等をかけたり本体に水等をつけたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 洗剤や超音波洗浄はしないでください。
- (5) 極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください。
- (6) 体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
- (7) 電池が消耗した場合、表示部の右上に電池低圧マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- (8) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。
- (9) 本品を廃棄する際は、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、 작동するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ドリテック

製造業者：VEGA TECHNOLOGIES INC. (中国)

連絡先 株式会社ドリテック お客様相談センター

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

電話：0120-875-019

(月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。