

機械器具（06）呼吸補助器  
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ（70569000）

## グリーンバブル オキシジェン チューブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 本品の滅菌禁止「変形等の損傷により予期しない健康被害発生のおそれ」
2. 本品をアルコール等の有機溶剤と接触させないこと [アルコール含有消毒剤及び脱脂目的によるアセトン等の有機溶剤に接触すると強度が低下し、亀裂が生じ予期しない健康被害発生のおそれ]

#### 【形状・構造及び原理等】



本品はバブルと呼ぶふくらみを有し、切断位置によりチューブ径を選択できる。酸素供給のための呼吸回路に供する。  
本品は、ポリ塩化ビニルを使用している

<寸法>


全長	30m±1m
最大外径	φ 10.6mm±0.4
最小外径	φ 4.6mm±0.4
バブル間隔	1000mm±100mm

#### 【使用目的又は効果】

本品は、酸素ガスを供給するために用いる。

#### 【使用方法等】

- (1) 接続する呼吸回路（酸素マスクや酸素ボンベ、院内酸素配管など）にあるコネクタの径に合わせて本品を切断し、接続端を得る。

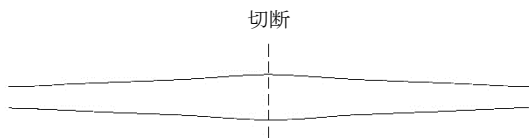

- (2) 接続端を、接続先のコネクタとしっかり接続する。



接続するコネクタ

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 使用期限に留意し使用すること。
- (4) 使用前に閉塞がないことを確認して使用すること。[チューブが折れたりつぶれたりしていることがあるため]
- (5) 接続部の漏れや外れに注意し、適宜増し締め、締め直し等の適切な処置を行うこと。[接続部は使用中に緩むことがあるため]
- (6) 全操作中に、メス、ハサミ、縫合針等をチューブに接触させないこと。
- (7) チューブを折り曲げた状態、チューブが扁平した状態で使用しないこと。

##### 2. 不具合・有害事象

本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

- (1) 重大な不具合  
機器の破損/変形、閉塞、接続外れ
- (2) 重大な有害事象  
無気肺、低酸素症

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件  
室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. <有効期間>  
使用期限は外箱に記載（自己認証による）

#### 【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献
  - (1) 医薬安第 1017001 号「ポリ塩化ビニル製の医療用具から溶出する可塑剤 (DEHP) について」(2002 年 10 月 17 日、厚生労働省)
  - (2) 文献請求先  
コヴィディエンジャパン株式会社  
カスタマーサポートセンター：0120-998-971

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者： イワキ株式会社  
製造業者： GCMEDICA ENTERPRISE LTD. (WUXI)  
製造国名： 中華人民共和国  
総販売元： コヴィディエンジャパン株式会社  
問合せ先： カスタマーサポートセンター  
0120-998-971