

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 採血用穿刺器具 JMDNコード 70226000

アキュチェック セミディスポ

【警告】

- 1.採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。
傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
- 2.使用後の穿刺針には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
- 3.穿刺針を本品に取り付けたまま放置しないでください。[誤って穿刺される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

- 1.穿刺針は再使用禁止です。一度使用した穿刺針は再使用せず、必ず新しい穿刺針を使用してください。[感染の危険性があります。]
- 2.穿刺針を本品に取り付けるときは、穿刺ボタンを押さないでください。[誤って穿刺されます。]
- 3.本品に取り付ける途中で取り外した穿刺針は使用しないでください。[針が出たままの状態になったり、無菌性の保証ができない場合があります。]

*【形状・構造及び原理等】

本品は、本体、穿刺ボタン、深度調節ダイヤル、取り外しボタンで構成されます。

原理:穿刺ボタンを押すことで、本体内部のスプリングにより穿刺針を突出させ穿刺する。

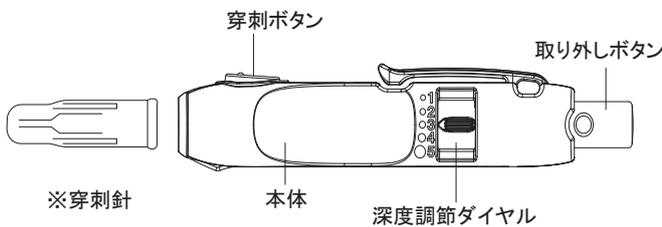

※組み合わせ医療機器(別売)

販売名 : アキュチェック セミディスポ ランセット


医療機器認証番号 : 224AFBZX00050000

【使用目的又は効果】


本品は、血糖値測定等の微量採血を目的とする専用の穿刺針を取り付けるために用いる穿刺器具です。

【使用方法等】


1. 深度調節ダイヤルを回して、穿刺深度を調節します。穿刺深度は5段階あります。穿刺深度は穿刺設定目安を参考にしてください。

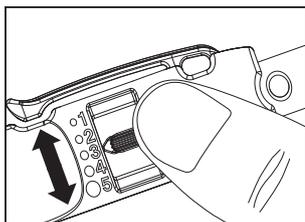


穿刺設定目安

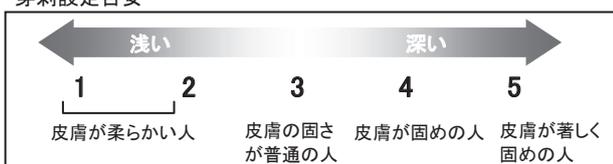

- * 2. 穿刺針を本品に取り付けてください。取り付けるときは、穿刺針の向きに注意して、奥までしっかりと差し込んでください。差し込むことで自動的に穿刺できる状態になります。

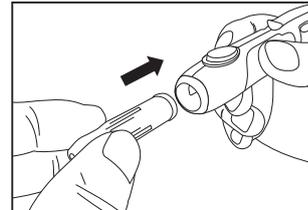


穿刺針の取り付け方向

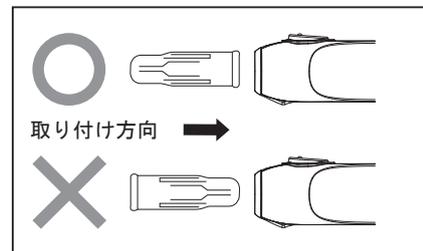

- ** 3. 穿刺前に必ず流水で手をよく洗い、じゅうぶんに乾かしてください。



4. 穿刺針の先端を穿刺部位に押し当て、穿刺ボタンを押してください。穿刺した後は、穿刺した部位の周りを軽く押し、血液を必要量出します。

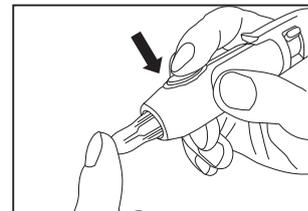

5. 廃棄用の容器へ向けて、取り外しボタンを押してください。穿刺針が外れます。

