

ワンタッチアクロ

【警告】

- 1.採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。
傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
- 2.使用後の穿刺針には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
- 3.穿刺針を本品に装着したまま放置しないでください。[誤って穿刺される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

穿刺針は再使用禁止。一度使用した穿刺針は再使用せず、必ず新しい穿刺針を使用してください。[感染の危険性があります。]


【形状・構造及び原理等】

本品は、本体、穿刺ボタン、確認窓、穿刺深度表示、深度調節ダイヤル、取りはずしボタンで構成されます。

原理: 穿刺ボタンを押すことで、本体内部のスプリングにより穿刺針を突出させ穿刺する。

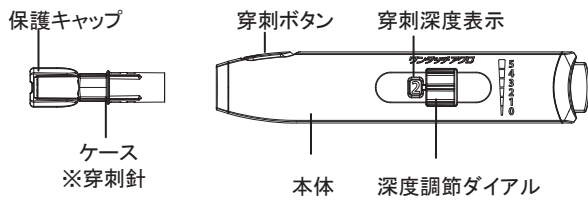

< 穿刺針取り付け時 >

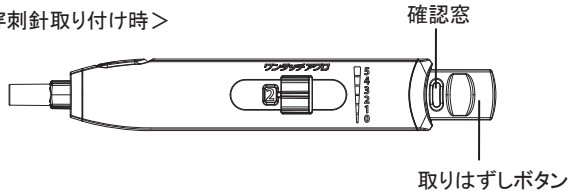

※組み合わせ医療機器(別売)


販売名 : ワンタッチアクロランセット
医療機器認証番号 : 227AFBZX00092000

【使用目的又は効果】

本品は、血糖値測定時の血液を採取するための穿刺器具で、専用の穿刺針を装着して使用します。

【使用方法等】


1. 穿刺針の取り付け

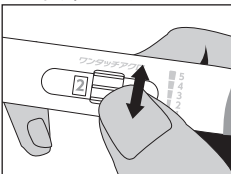


1)

:0/ 5/


6

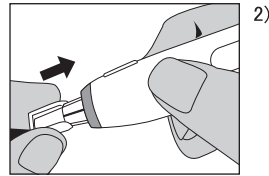

2)

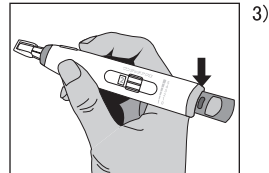


3)

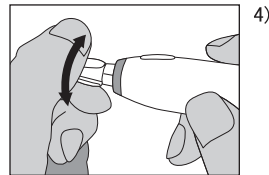


4)


2. 採血方法

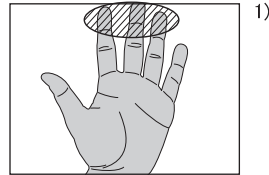

1)

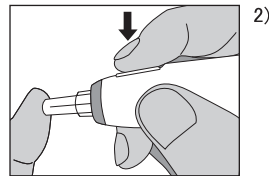

2)

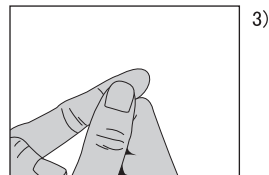

3)

3. 使用済み穿刺針の取りはずし方法

