

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

アダプタキャップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

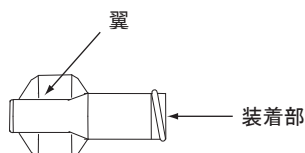

【使用目的、効能又は効果】

輸液セットのオスアダプタ又はシリンジの先端等を被覆し、内容液の漏れを防止するのに用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装のふたを完全に剥がし、包装の外側から本品を摘みます。
2. 包装（透明部分）に入った状態の本品の装着部とオスアダプタ等を軽く装着し、包装を取ります。
3. 本品の翼を持ち、回転させながらオスアダプタ等に確実に装着します。
4. 使用後は、翼を持ち、回転させながら外します。

使用方法に関連する使用上の注意

- 包装を取る際、強く摘まないこと。〔装着したオスアダプタ等から本品が外れる可能性がある。〕
- 装着部に薬液等を付着させないこと。〔装着部に緩みが生じる。〕
- 本品を装着する際は、過度な締め付けや横方向の負荷を加えないこと。〔本品が外れない、本品又は装着相手が破損する可能性がある。〕
- 本品を装着した状態で過度な負荷をかけないこと。〔本品が外れる、及び装着が緩み内容液が漏れる可能性がある。〕
- 本品をシリンジに接続して薬液等を投与する際、本品は必ず外し、装着した状態で押し子を押さないこと。〔本品が外れる、又は装着が緩みシリンジの内容液が漏れる。特に、患者の口へ直接投与する場合は、本品が患者の喉に詰まる可能性がある。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 本品に衝撃を与えないこと。〔破損する可能性がある。〕
 - 併用する医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
 - 本品を鉗子等で摘まないこと。〔破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕
 - 冷蔵保存等低温下での取扱いに注意すること。〔低温下では本品の耐衝撃性が低下している。〕
 - 本品は、異物混入を防ぐものであるため、内容液の無菌性を保持す

る目的で使用しないこと。

- 本品を薬液等を長期保存する目的で使用しないこと。
2. その他の注意
 - 患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。
 - 装着部を直接手で触れないこと。
 - 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。〔自己認証（当社データ）により設定〕

【包装】

100個入／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806