

一般医療機器

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
輸液用アクセサリセット 70326001

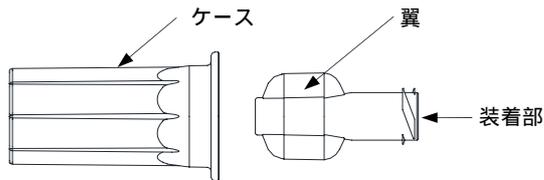
アダプタキャップ

(ハードケースタイプ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止**【形状・構造及び原理等】**

< 構成 >

**【使用目的、効能又は効果】**

輸液セットのオスアダプタ又はシリンジの先端等を被覆し、内容液の漏れを防止するのに用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. ケースを手を持ち、ふたを完全にはがします。
2. ケースの外側から本品を保持し、本品の装着部をオスアダプタ等に回転させながら確実に装着します。
3. ケースをまっすぐ取り外します。
4. 使用後は、翼を持ち、回転させながら取り外します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

ケースから取り外す際、強く摘まないこと。[装着したオスアダプタ等から本品が外れる可能性がある。]

本品を装着する際は、過度な締めつけや横方向の負荷を加えないこと。[本品が外れない、本品または装着相手が破損する可能性がある。]

装着部に薬液等を付着させないこと。[装着部に緩みが生じる可能性がある。]

本品を装着した状態で過度な負荷をかけないこと。[本品が外れる、および装着が緩み内容液が漏れる可能性がある。]

キャップに緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れないことを確認すること。

本品をシリンジ等に装着する場合は、注入前に本品を外して使用すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

包装が破損、汚損している場合、および製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。

包装を開封したらすぐに使用すること。

本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]

併用する医薬品および医療機器の添付文書を確認後、使用すること。

本品を鉗子等で摘まないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]

冷蔵保存等低温下での取り扱いに注意すること。[低温下では本品の耐衝撃性が低下しており強い衝撃を与えた場合、破損することがある。]

本品は菌の繁殖防止およびシリンジ等の内容液の効力維持に有効なものではない。

2. その他の注意

装着部を直接手で触れないこと。

患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。

使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

100個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806