

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

コネクタキャップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造>

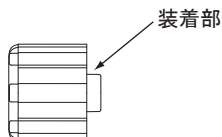

【使用目的、効能又は効果】

輸液セットのメスコネクタ等を被覆し、内容液の漏れを防止するのに用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装から本品を取出します。
2. 本品の装着部をメスコネクタ等のロック部に回転させながらねじ込み、メスコネクタ等の開口部を被覆します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 本品をメスコネクタ等と装着する際は、過度な締め付けをしないこと。[本品が外れない、本品又は装着相手が破損する可能性がある。]
- 本品を装着させた状態で過度な負荷をかけないこと。[本品の外れ及び緩みにより、内容液が漏れる可能性がある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
 - 併用する医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
 - 本品を鉗子等で摘まないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]
 - 本品は、異物混入を防ぐものであるため、内容液の無菌性を保持する目的で使用しないこと。
 - 本品を薬液等を長期保存する目的で使用しないこと。
 - 使用中装着部の緩み、液漏れ破損等に注意すること。
2. その他の注意
 - 患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。
 - 装着部を直接手で触れないこと。
 - 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（当社データ）により設定]

【包装】

200個入／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元
 株式会社ジェイ・エム・エス
 広島市中区加古町12番17号
 郵便番号：730-8652
 電話番号：082-243-5806